

# Kurzanleitung DIGITALKEYCODE Testdurchführung mit Zertifikaterstellung

START

Proband erhält SWISSONEMED Antigen Test (nach Wunsch Nasenabstrichtest oder Speicheltest) mit **eindeutigem QR-CODE**

**PROBAND**



1

Proband scannt den oben mit "P" gekennzeichneten QR-CODE und registriert sich mit seiner persönlichen Email-Adresse. Identifikations-QR-CODE wird angezeigt.

**AUFSICHTSPERSON**



1

Autorisierte Aufsichtsperson scannt den mit "A" gekennzeichneten QR-CODE oder ruft <https://app.digitalkeycode.com/aufsicht> auf und der Testpunkt wird ausgewählt.

2

Proband lässt den eindeutigen QR-CODE auf seinem Test-Tray von der Aufsichtsperson scannen



QR-CODE auf der Rückseite des Test-Tray des Probanden scannen

2

3

Identifikations-QR-CODE wird angezeigt




Identifikations-QR-CODE vom Gerät des Probanden scannen. Test-Tray wird dem Probanden zugeordnet

3

OPTIONAL




Corona-Warn-App-Schnelltestprofil kann alternativ vorgezeigt werden

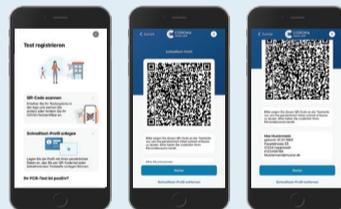

Testergebnisse können in die Corona Warn App übernommen werden

4

Test unter Aufsicht selbst durchführen

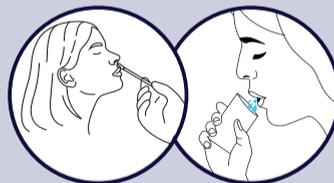

maximal 15 Minuten

Testdurchführung beaufsichtigen. Weitere Probanden können parallel erfasst werden

4

5

RAPIDOC E-Zertifikat wird per Email an Proband versandt.



FERTIG



Nach vorgeschriebener Wartezeit QR-CODE auf Test-Tray erneut scannen und Ergebnis erfassen

5

DIGITALKEYCODE steht auch zum Download aus App-Stores zur Verfügung.

