



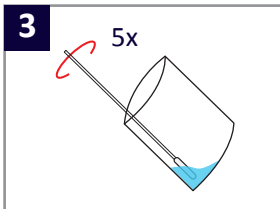
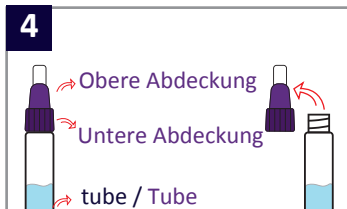
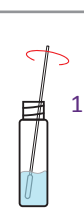
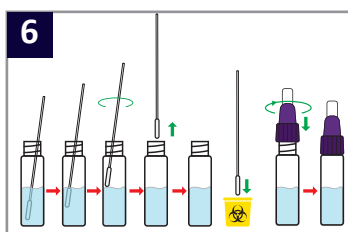
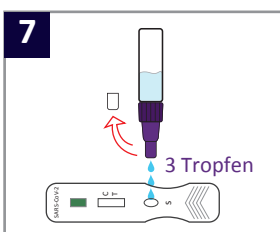
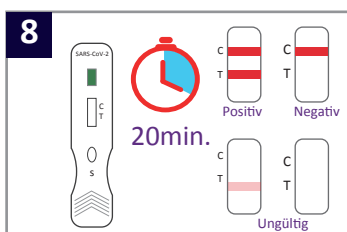


# SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Saliva)

## Speichel-Schnelltest



### Gebrauchsanweisung / Instructions for use

<p><b>1</b></p> <p>30 Minuten vor Speicheltest</p> <p></p> <p>Nicht essen Nicht trinken Nicht rauchen</p>	<p><b>2</b></p>  <p>0.5cm Füllhöhe</p>	<p><b>3</b></p> <p>5x</p> 	<p><b>4</b></p> <p>Obere Abdeckung Untere Abdeckung tube / Tube</p> 
<p><b>5</b></p>  <p>10x / 10sek.</p>	<p><b>6</b></p> 	<p><b>7</b></p> <p>3 Tropfen</p> 	<p><b>8</b></p> <p>20min.</p> <p>Positiv Negativ Ungültig</p> 

**1.** 30 Minuten vor dem Speicheltest nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen. **2.** Spucken Sie bis zu einer Tiefe von 0,5 cm in den Einweg-Probenbehälter. **3.** Rühren Sie den Speichel mit dem Stäbchen 5x um. **4.** Lösen Sie die untere Abdeckung des Extraktionsrohrs. **5.** Verrühren Sie den Speichel etwa 10 Sekunden lang gründlich mit dem Stäbchen. **6.** Drücken Sie die Tuferspitze des Tufers an der Innenwand des Probenentnahmeröhrchens entlang, um so viel Flüssigkeit wie möglich im Röhrchen zu halten. Entfernen und entsorgen Sie den Einweg-Probenentnahmestab. Verschließen Sie das Röhrchen fest, schütteln Sie das Extraktionsröhrchen leicht und mischen Sie die Probe zur Verwendung. **7.** Geben Sie nun 3 Tropfen auf die Probenvertiefung des Testgeräts und halten Sie das Rohr dabei senkrecht. **8.** Nach 20 Minuten wird das Testergebnis angezeigt. Interpretation der Test Ergebnisse, siehe bitte Gebrauchsanweisung.

**1.** No food, no drink, no smoke, 30 minutes before saliva test. **2.** Spit saliva into the disposable sample container for 0.5cm in depth. **3.** Use the rod head to stir the saliva counter clockwise for 5 circles. **4.** Loosen the lower cover of extraction tube. **5.** Rotate the rod close to the extraction tube wall for about 10 seconds or 10 times. **6.** Press the tip of the swab along the inside wall of the tube to hold as much liquid as possible in the tube. Remove and discard the disposable collection stick, close the tube tightly, shake the extraction tube gently, and mix the sample for use. **7.** Add 3 drops vertically into the sample well of the test device. **8.** View the result within 20 minutes.

## QUICK GUIDE

<https://swissonemed.ch/de/Schnelltest-Speichel>